



CÂNULA NASOFARÍNGEA

INSTRUÇÃO DE USO

CÂNULA NASOFARÍNGEA KELP MED

Registro Anvisa: 81395830012

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA:

Nome técnico: Cânula

Matéria Prima: Tubo de PVC (Cloro de Polivinila)

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (X)Sim () Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Cânula Nasofaríngea Kelp Med é confeccionado em PVC, anatomicamente ajustável à cavidade nasal; sua ponta distal é biselada, com bordas arredondadas que proporcionam maior conforto ao paciente uma vez que facilita a introdução.

INDICAÇÃO DE USO:


- Indicado para facilitar a ventilação das vias aéreas em tratamentos intensivos, na manutenção das vias aéreas superiores durante o procedimento de anestesia;
- Estabelece uma via aérea alternativa durante acidentes ou procedimentos de emergência quando a via orofaríngea está ocluída;
- Permite que o paciente receba oxigênio continuamente.

INSTRUÇÃO DE USO:

- Selecionar o tamanho correto do Cânula Nasofaríngea segundo as técnicas médicas atualmente aceitas;
- Lubrificar levemente a Cânula Nasofaríngea antes da inserção, com um gel lubrificante solúvel em água (adquirido separadamente);

- Monitorizar com frequência a posição da via respiratória.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

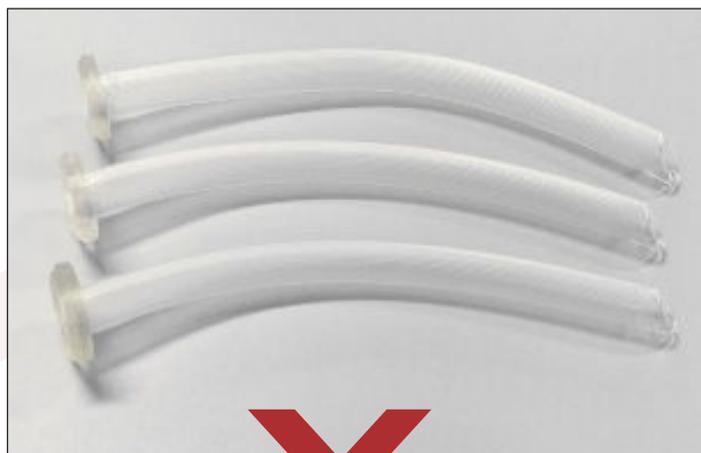

NOME DO PRODUTO	REFERÊNCIA	ID DO TAMANHO	Tamanho FR
Cânula Nasofaríngea	PA190230	3,0mm	14fr
	PA190235	3,5mm	16fr
	PA190240	4,0mm	18fr
	PA190245	4,5mm	20fr
	PA190250	5,0mm	22fr
	PA190255	5,5mm	24fr
	PA190260	6,0mm	26fr
	PA190265	6,5mm	28fr
	PA190270	7,0mm	30fr
	PA190275	7,5mm	32fr
	PA190280	8,0mm	34fr
	PA190285	8,5mm	36fr
PA190290	9,0mm	38fr	


PRECAUÇÕES/CONTRAINDICAÇÕES:

- Antes da utilização, verificar a integridade da Cânula;
- Período máximo recomendado para o uso é de 30 dias;
- Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;
- Não deve ser reutilizado;
- Não deve ser utilizado em pacientes com suspeita de fratura da base do crânio, pois existe risco de introdução intracraniana da Cânula.

STERILE EO



Produto isento de Látex e de uso único, esterilizado em gás óxido de etileno - ETO, de acordo com as diretrizes e certificações internacionais de segurança.

NOME DO PRODUTO	REFERÊNCIA	ID DO TAMANHO	Tamanho FR
Cânula Nasofaríngea	PA190130	3,0mm	14fr
	PA190135	3,5mm	16fr
	PA190140	4,0mm	18fr
	PA190145	4,5mm	20fr
	PA190150	5,0mm	22fr
	PA190155	5,5mm	24fr
	PA190160	6,0mm	26fr
	PA190165	6,5mm	28fr
	PA190170	7,0mm	30fr
	PA190275	7,5mm	32fr
	PA190180	8,0mm	34fr
	PA190185	8,5mm	36fr
	PA190190	9,0mm	38fr

DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR:

KELP MED COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME
 AV. MERITI, 2727 SALA 204 - VILA DA PENHA CEP: 21.211-007
 RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 03.985.711/0001-50
 Aut. Func. N° 8.13.958-3

Responsável Técnica: Margarida Nogueira Kelp - CRFa-RJ 7079
 SAC: (21) 3755-3731 - www.kelpmed.com.br

FABRICANTE:

Hangzhou Formed Medical Devices Co.,Ltd.

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM:

Embalado individualmente em envelope constituído de filme e Tyvek.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Armazenar em local seco, arejado e abrigado do sol.
 Transportar na embalagem original.